
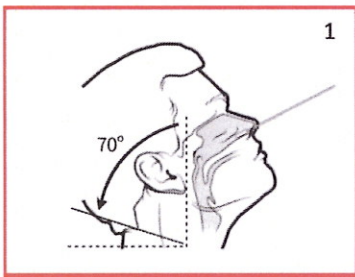



Naudojimosi instrukcija

Pakuotės sudėtis:


1. Tamponėlis
2. Mėgintuvėlis
3. Testavimo kasetė

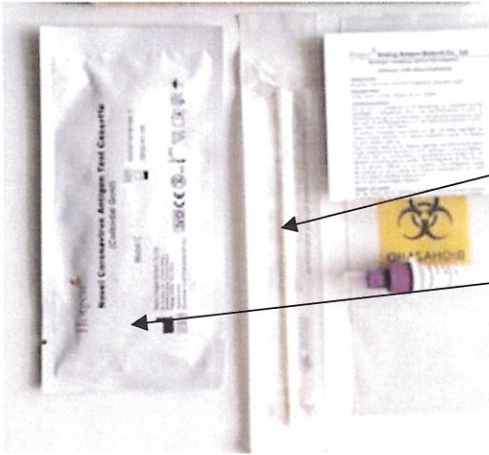

1 Priekinėje nosies landoje pagaliuką su tamponu pasukiojame po penkis kartus abiejose nosies landose.

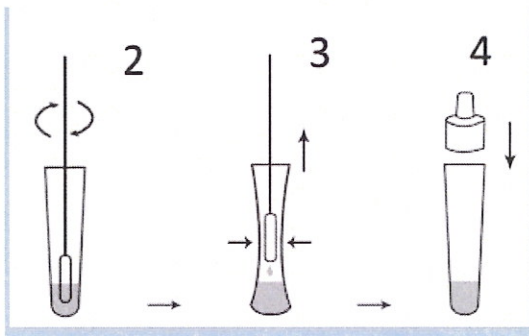

Atsukame violetiniu kamšteliu esantį mėgintuvėlį. Pagaliuką su tamponu (kur sukiojome nosies ertmėje) įkišame į mėgintuvėlį, pasukiojame 30 s ir paspaudžiame į šonus. Pagaliuką išmetame, o mėgintuvėlį užsukame kamšteliu.

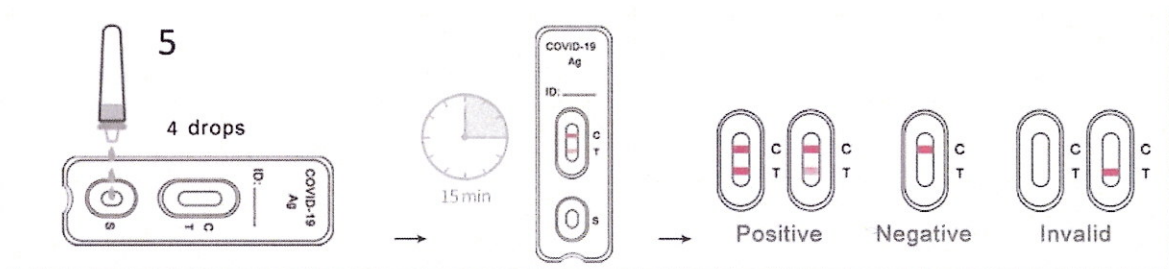

Mėgintuvėlyje esančio skysčio 4 lašus lašiname į kasetės apačioje esančią angą, pažymėtą S raide su lašiuko ženklu. Laukiame 15 min. Jeigu išryškėja vienas brūkšniukas ties C raide, jūsų rezultatas NEIGIAMAS, jeigu atsiranda ir antras brūkšniukas ties T raide, jūsų rezultatas TEIGIAMAS ir jums reikia atlikti PGR testą iš nosiaryklės registruojantis į mobilių COVID-19 tyrimų punktą tel. nr. 1808 arba www.koronastop.lt

Rekomenduojama antrą testą atlikti paskutinę rudens atostogų dieną - lapkričio 9 d. (prieš grįžimą į mokyklą).